


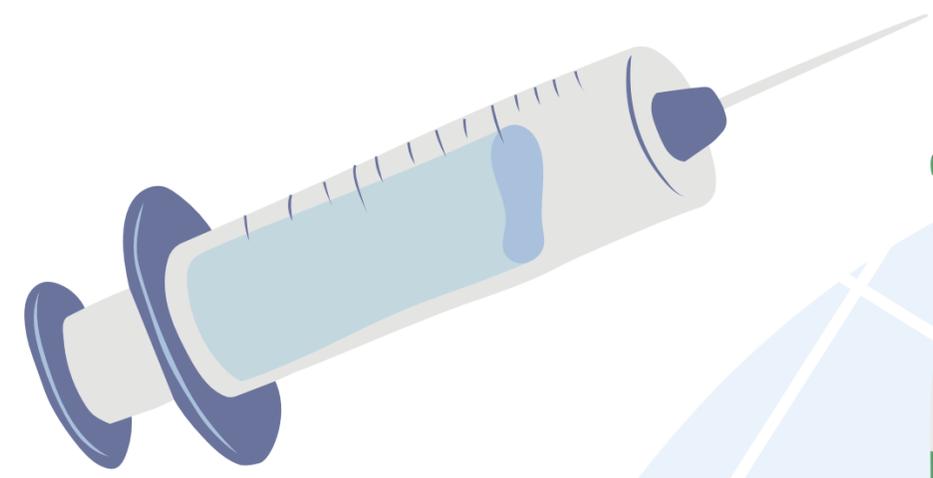

**TAKE CARE  
YOURSELF**

**WELCOME  
BACK TO**


**MU**



# การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ



**บัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน**

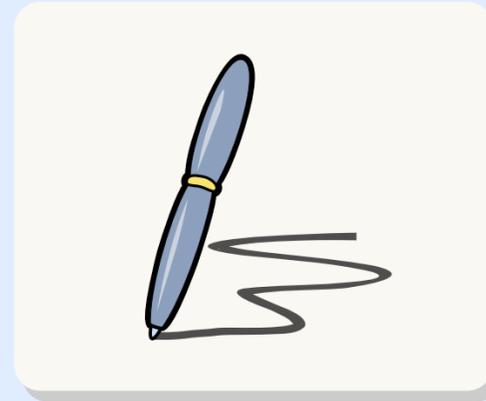

**นำปากกามาด้วยตนเอง**




**ควรพก Alcohol 70%**



**ควรดูวิดีโอสาริต  
การใช้งานชุดตรวจ ATK  
ยี่ห้อ BAICARE มาก่อน**



**ไม่ควรรับประทาน  
อาหารมื้อหนัก  
ก่อนมาตรวจ 30 นาที  
เพื่อป้องกันการสำลัก**

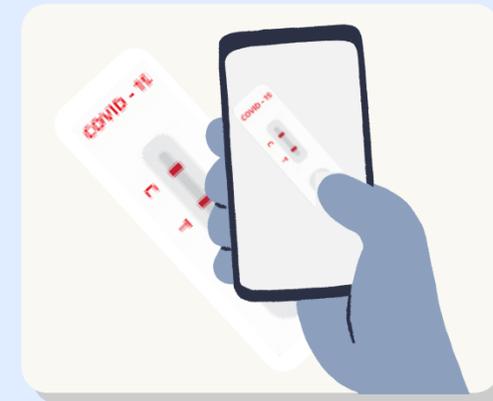

**นำโทรศัพท์มาเพื่อ  
ถ่ายรูปผลตรวจ  
ส่งเจ้าหน้าที่**

# การเข้ารับการตรวจ ATK

\* เป็นเพียงตัวอย่างการจัดสถานที่ตรวจเพียงเท่านั้น  
แล้วแต่ทางคณะ/วิทยาเขตจะนำไปปรับใช้ \*

# การเข้ารับการตรวจ ATK


## 1. จุดลงทะเบียน




- ตรวจวัดอุณหภูมิ
- ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล/สเปรย์
- รับชุดตรวจ ATK, เอกสารลงทะเบียน

**\* Social Distancing \***

**อย่าลืม ! เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร**

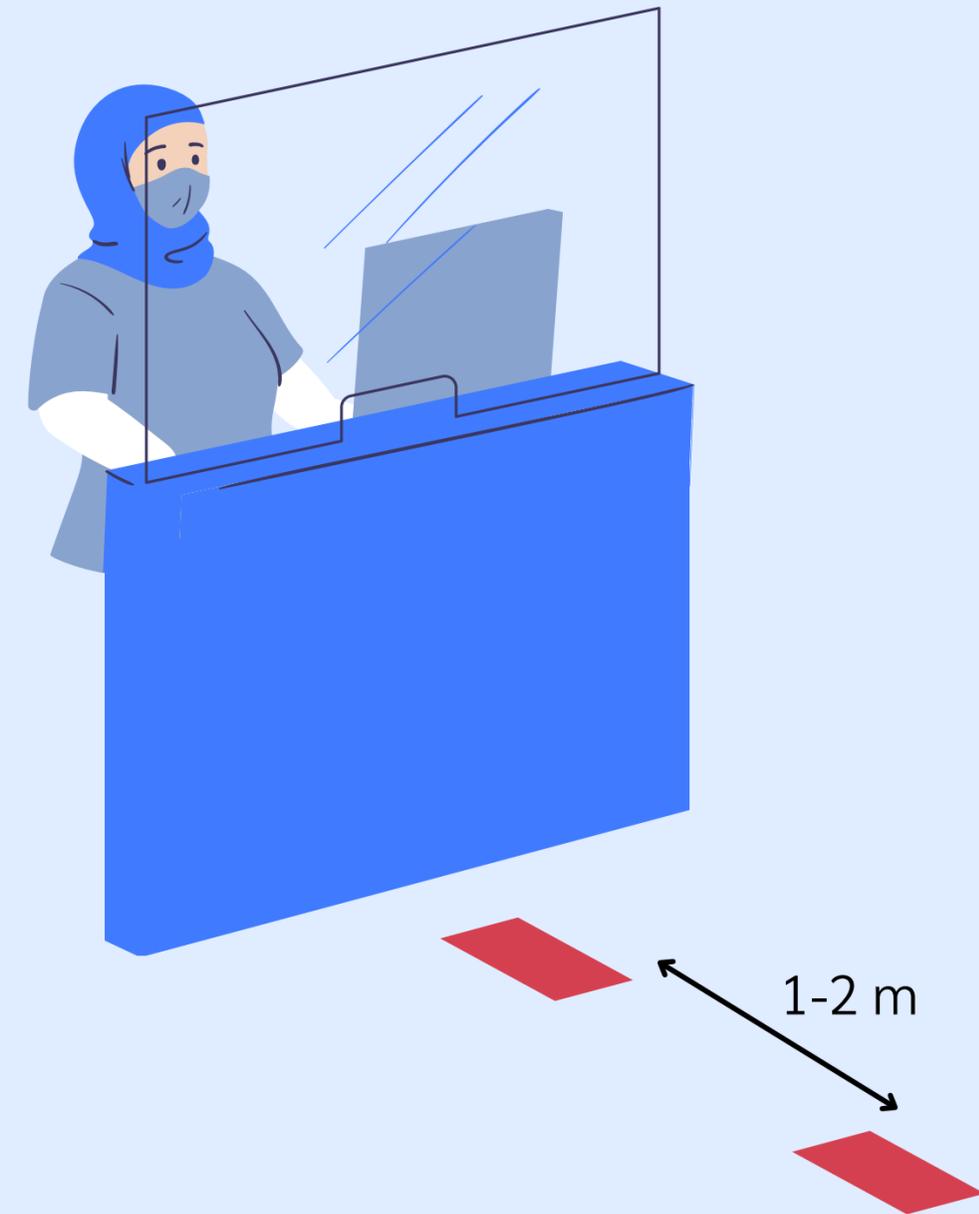

# สิ่งที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน

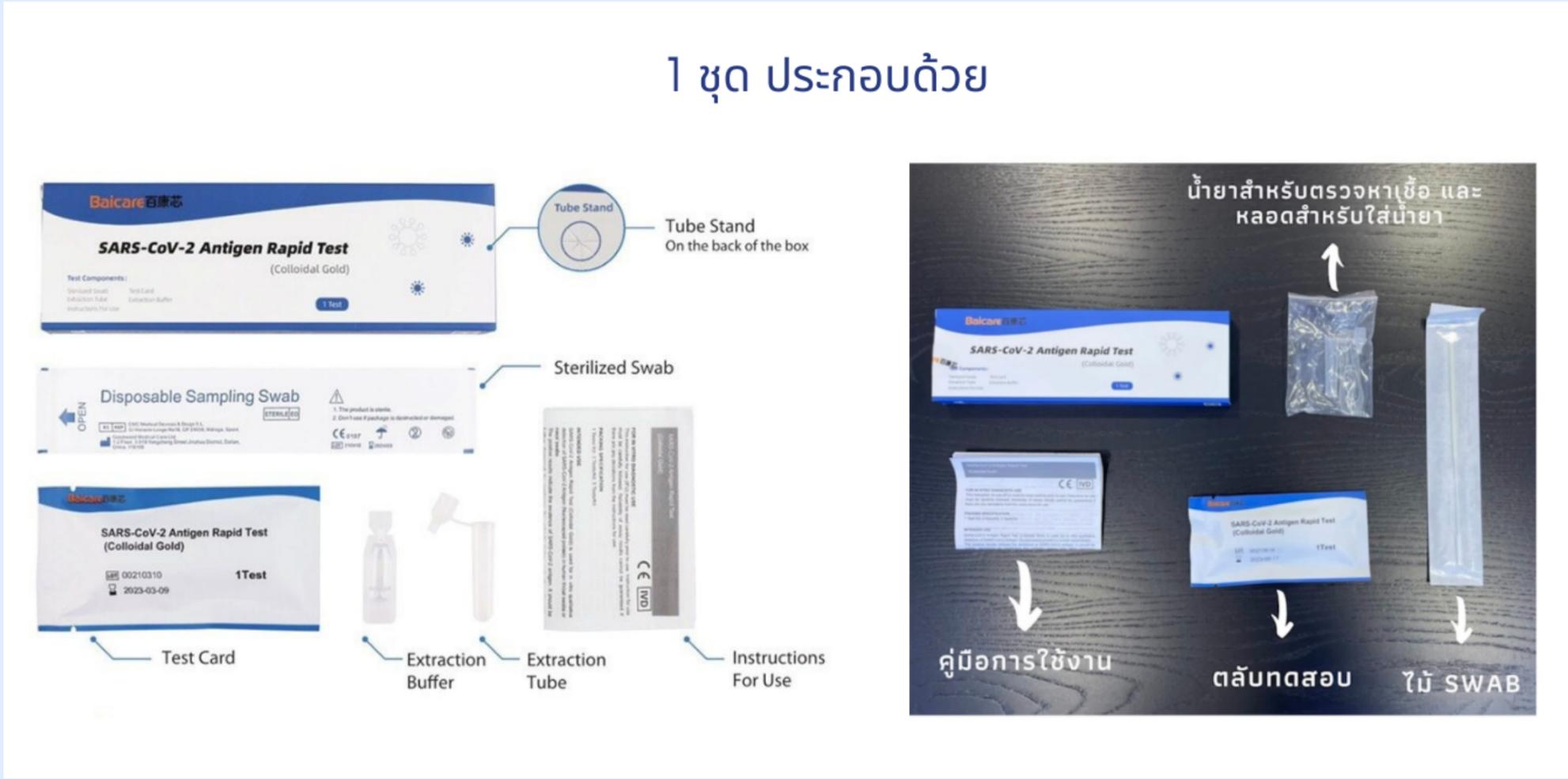

นักศึกษา     บุคลากร

**แบบบันทึกผลตรวจ ATK**

ชื่อ-นามสกุล.....  
 รหัสนักศึกษา.....คณะ.....

วางชุดตรวจ ATK ลงบนกรอบนี้ และถ่ายภาพส่ง เมื่อครบกำหนดเวลา

วางชุดตรวจ ATK ในช่องนี้  
ถ่ายภาพผลตรวจเมื่อครบเวลาที่กำหนด และส่งภาพไปยัง .....




Scan QR Code และส่งภาพผลตรวจ


QR code สำหรับส่งภาพผลตรวจ  
หมายเหตุ : คณะกำหนดช่องทางการส่งผลเอง

## 2. จุดตรวจ


- ทำความสะอาดโต๊ะที่ว่าจะวางจุดตรวจก่อนและหลังการทดสอบ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในกล่อง และวันหมดอายุ
- ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังทำการทดสอบ

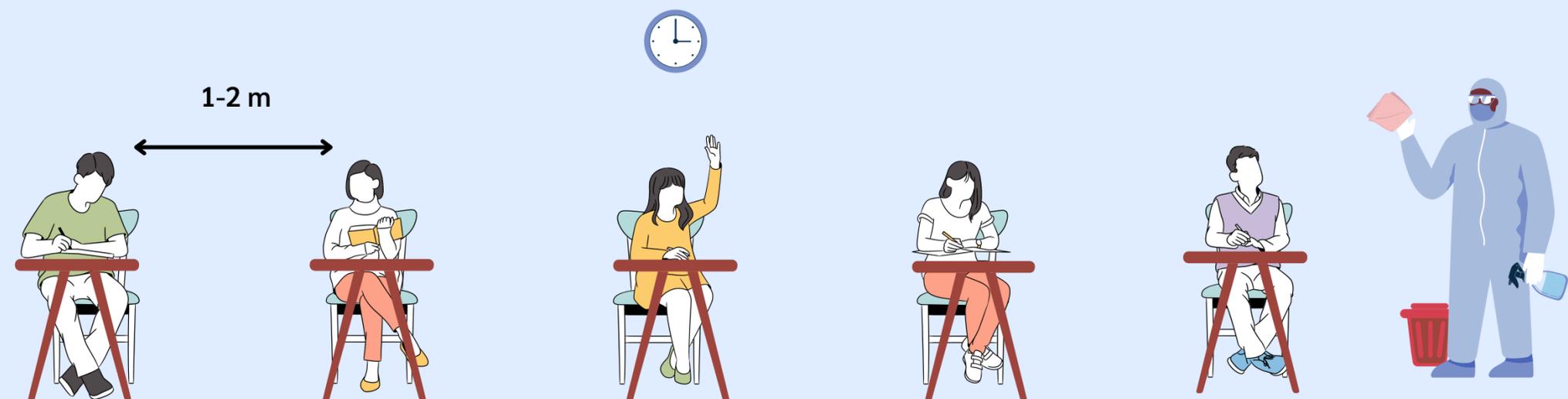

# ขั้นตอนการตรวจ

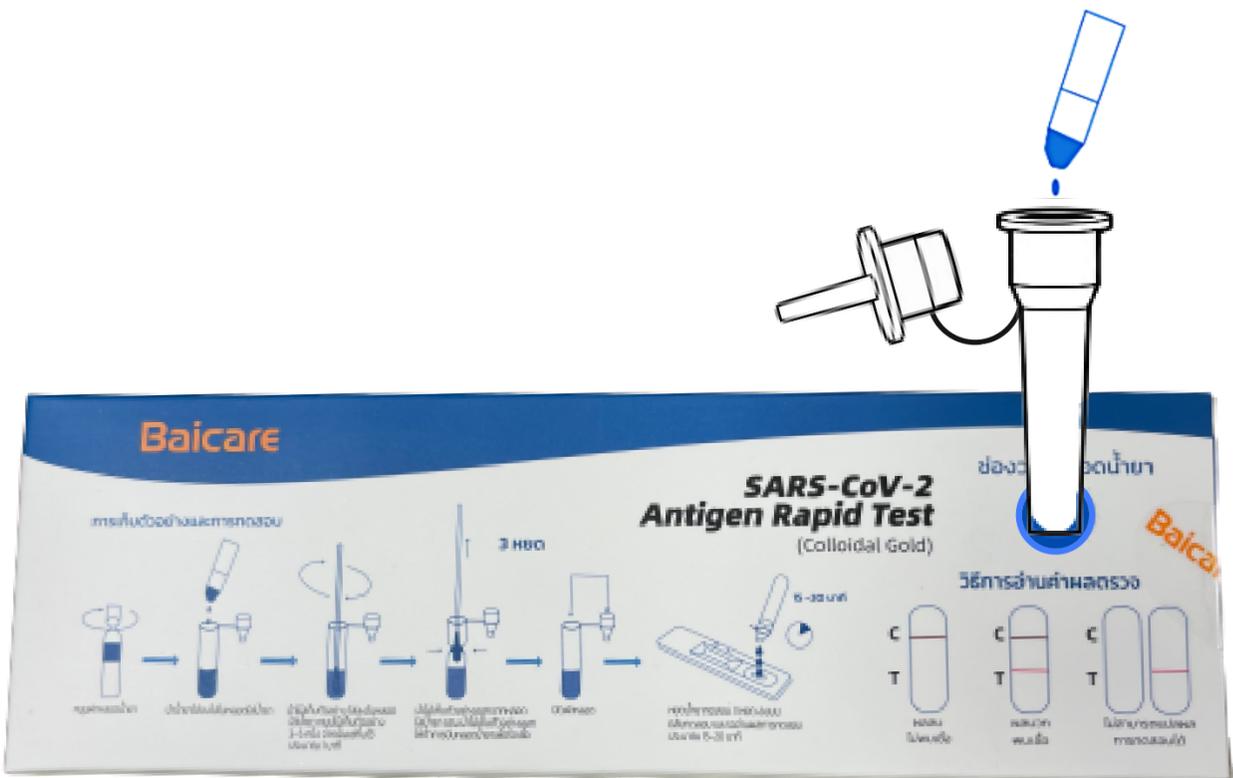


**เท้ายาลงในหลอด  
ตัวอย่าง**

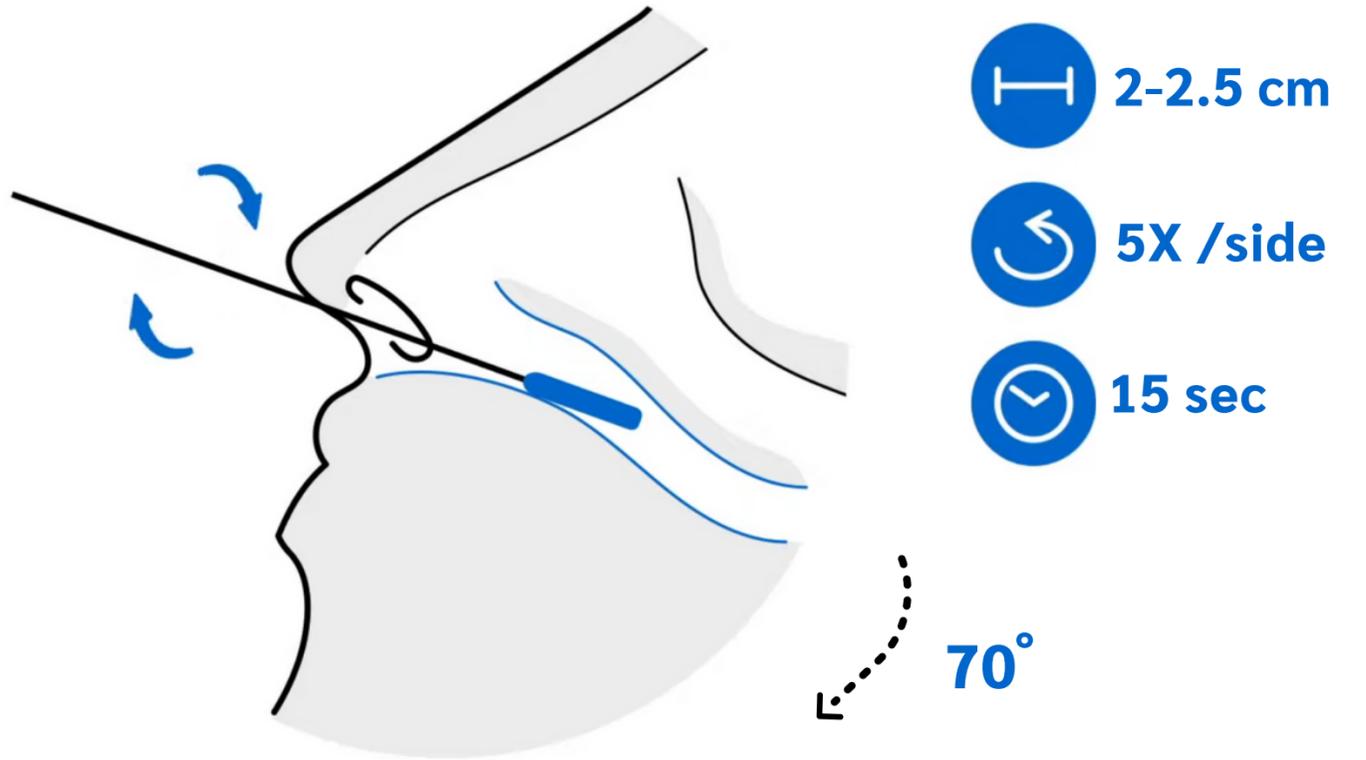


**ใช้ไม้ SWAB จมูกทั้ง 2 ข้าง  
ลึก 2 - 2.5 CM  
หมุนข้างละ 5 รอบ**

\*ห้ามแยงแรงจนเลือดออก เพราะหากมีเลือดจะไม่สามารถยืนยันผลตรวจได้ ต้องรอให้แผลหายและทำการทดสอบใหม่  
 \*ห้ามเอามือสัมผัสบริเวณที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน เนื่องจากจะมีเชื้อโรคจากมือปนเปื้อนลงไป

## ขั้นตอนการตรวจ

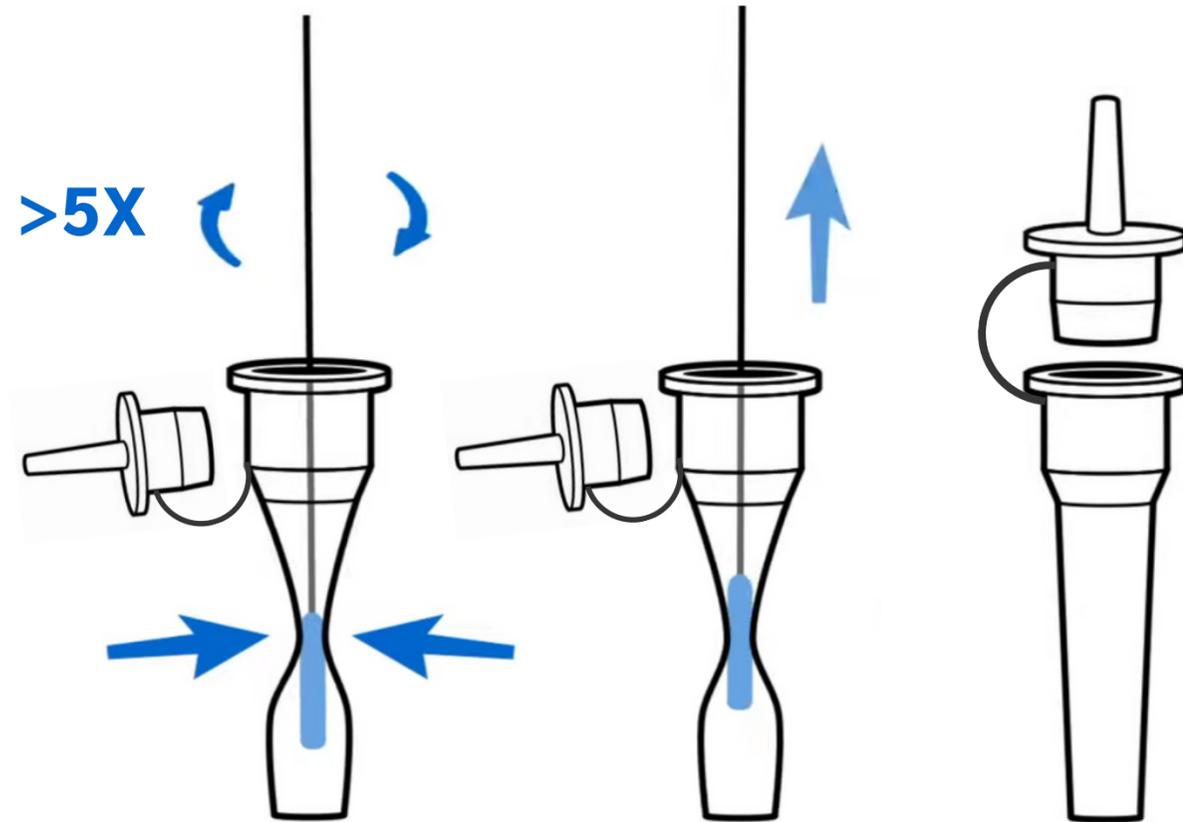

จุ่มไม้ SWAB ลงในหลอดน้ำยา  
หมุนและใช้นิ้วบีบ อย่างน้อย 5 รอบ  
เอาไม้ออก ปิดฝาจุก รอ 1 นาที

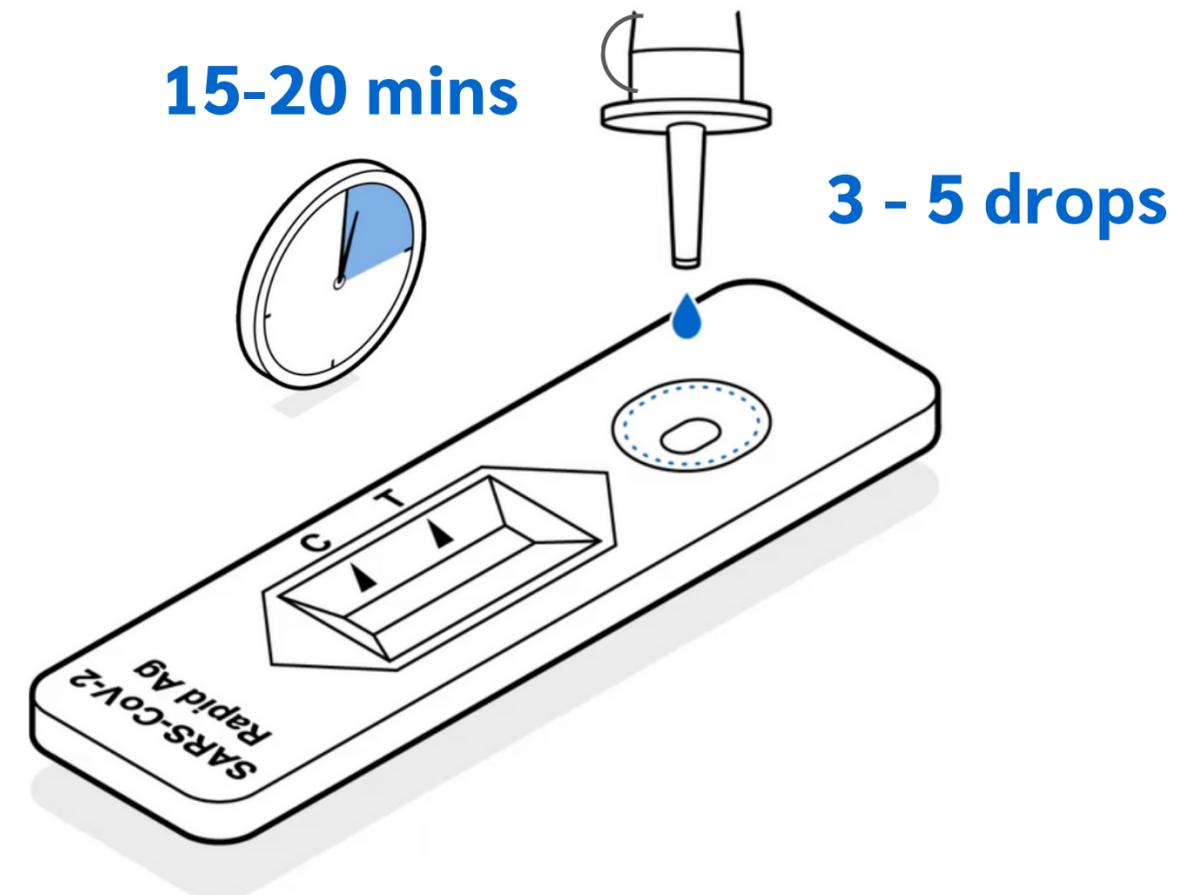


หยดตัวอย่างที่สกัดแล้ว  
ลงบนแถบทดสอบ 3-5 หยด  
รอผล 15-20 นาที

## การอ่านผล





**NEGATIVE**

ขีดขึ้น ตัว C

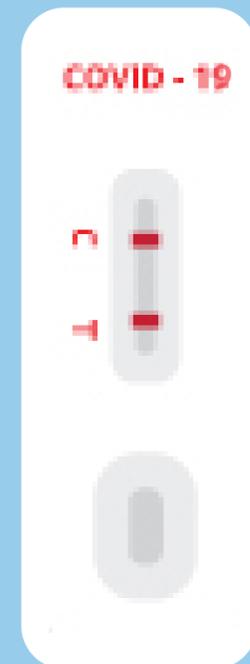

**POSITIVE**

ขีดขึ้น ตัว C และ T

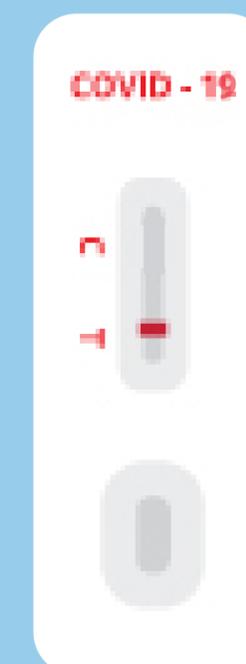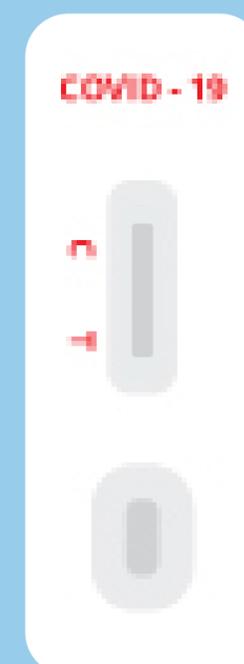

**อ่านผลไม่ได้**

ไม่ขึ้นขีด หรือ ขีดขึ้น ตัว T

\*หากพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอชุดตรวจใหม่ทดสอบอีกครั้ง

### ข้อควรรู้

- ชุดตรวจ Antigen Test Kit ต้องได้รับเข้ามาแล้ว 5-14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลแม่นยำ
- หากเสียงสูง ให้แยกกักตัวเอง 7 วัน จึงทดสอบซ้ำ และหากมีอาการคล้าย Covid-19 ทดสอบซ้ำทันที
- ผลการตรวจของทางมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สามารถนำไปรับรองเพื่อใช้กับวัตถุประสงค์อื่นได้



## 3. จุดรายงานผล

### หลังทราบผลตรวจ ATK

- วางชุดตรวจบนเอกสารที่มีชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ถ่ายภาพส่งให้เจ้าหน้าที่ตามช่องทางคณะ/ส่วนงานกำหนด
- ทิ้งชุดตรวจลงถังขยะติดเชื้อ

### กรณีเป็นบวก

- หลังจากถ่ายรูปส่งผลตรวจเรียบร้อยแล้ว
- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดรายงานผล เพื่อประสานไปยังรพ.ในสังกัด เพื่อนัดหมายตรวจ RT-PCR
- แจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยงทันที


### กรณีเสี่ยงสูง

- ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ พุดคุยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ติดเชื้อ, อยู่ในบริเวณปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ในระยะ 1 เมตร นานกว่า 15 นาที
- แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจัดสถานที่ให้กักตัว หอพักนักศึกษา 1 (กรณีอยู่ในพื้นที่ศาลายา และไม่สะดวกที่พักส่วนตัว)
- แนะนำให้แยกกักตัวเอง เผื่อระวังอาการ 7 วัน ทดสอบซ้ำ หากมีอาการป่วย คล้าย COVID-19 ให้ทดสอบซ้ำทันที


3



2

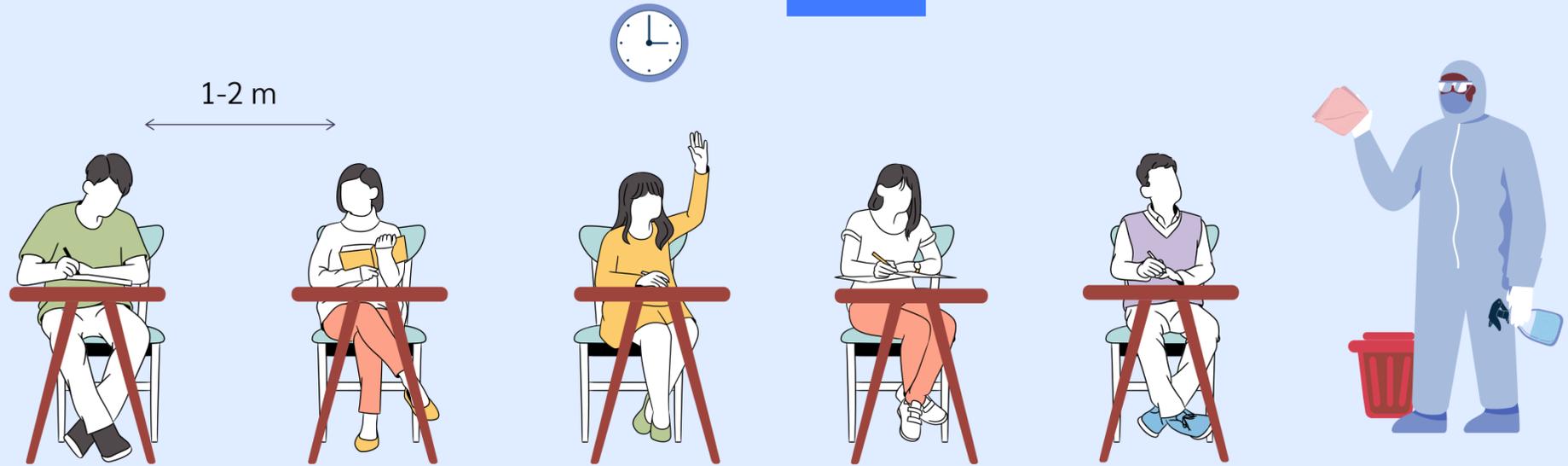

1

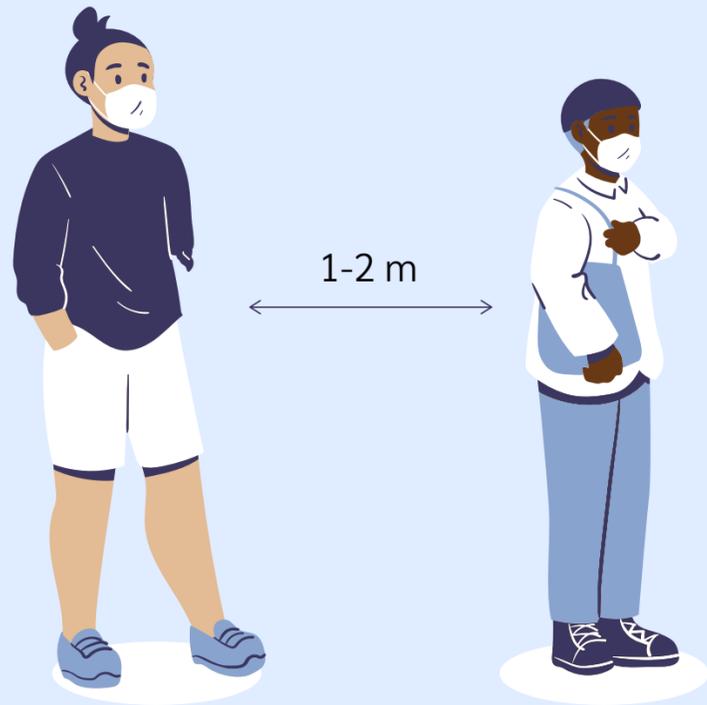

# หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา (MU Health) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 02-849-4529 ถึง 30

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox Facebook : Mahidol Health  
หรือ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

